



opti

Lubricating Jelly



INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

GEBRAUCHSANWEISUNG

HANDELSMARKE: OptiLube

ZUSAMMENSETZUNG:

100g enthalten:

• Glycerin 0,80% • PEG 15,4% • 4 Hydroxybenzoesäure-Ester 0,0308%

• Natriumhydroxid 0,24% • Gereinigtes Wasser 82,73%

ANWENDUNG: Als Gleitmittel

GEGENANZEIGEN: Überempfindlichkeit gegen Glycerin

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Beutel an einem Ende aufreißen und auftragen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

OptiLube ist ein sicheres und effektives Gleitmittel für den privaten und professionellen Gebrauch, empfohlen für:

- Einführung von Kathetern
- Endoskopie
- Während des Geschlechtsverkehrs
- Lubrikation von Kondomen
- Einläufe/ Spülungen
- Rektale Thermometer
- Gynäkologische Untersuchungen
- Übliche Anwendungen im Krankenhaus
- Digitale und instrumentale Untersuchungen

OptiLube ist unbedenklich für das menschliche Gewebe. Gummi und metallische Geräte, natürliche und synthetische Textilien werden durch

OptiLube nicht beeinträchtigt. OptiLube ist kein Verhütungsmittel.

NEBENWIRKUNGEN UNS BESONDERE

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahme: Wenn das Produkt beschädigt oder der Verschluss geöffnet ist, kann die Sterilität nicht garantiert werden.

Warnhinweis: Wenn Reizungen auftreten, OptiLube nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren. Augenkontakt vermeiden.

Bei Zimmertemperatur lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

KENNZEICHNUNG: Steriles, transparentes, wasserlösliches Gallert, nicht-fettend und leicht

DARREICHUNG:

Tütchen: 5g

LAGERANWEISUNG:

In gut verschlossenen Behältern unter 25 °C lagern

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

INSTRUCCIONES DE USO

MARCA: OptiLube

COMPOSICIÓN:

Cada 100g contiene:

• Glicerina 0,80g • PEG 15,4g • Ésteres del ácido 4-hidroxi-benzoico 0,0308% • Hidróxido de sodio 0,24% • Agua purificada 82,73%

UTILIZACIÓN: Utilizar como lubricante.

CONTRAINDICACIONES: Sensibilidad a la glicerina.

INSTRUCCIONES DE USO:

Rasgue el saco por un cabo y aplique el producto.

USO RECOMENDADO:

OptiLube Jelly es un lubricante personal y profesional seguro y efectivo, recomendado para:

- Inserción de catéteres
- Endoscopia
- Durante las relaciones sexuales
- Lubricación de preservativos
- Enemas/duchas vaginales
- Termómetros rectales
- Exámenes ginecológicos
- Procedimientos hospitalarios generales
- Examen digital e instrumental.

OptiLube es inocuo para el tejido humano y no daña la goma, los dispositivos metálicos, los instrumentos ni los tejidos naturales o sintéticos. OptiLube no es un anticonceptivo.

EFFECTOS SECUNDARIOS Y PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones: Si el producto se encuentra dañado o el sello abierto, no se garantiza la esterilidad.

Advertencias: En caso de irritación, deje de usarla y consulte con un médico.

Evitar el contacto con los ojos. Almacenar a temperatura ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

IDENTIFICACIÓN: Gel estéril, transparente y soluble en agua, ligero y sin grasa.

PRESENTACIÓN:

Sobres: 5g

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Guardar en recipientes bien cerrados por debajo de 25 °C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS